




## MediVacPac i **Transportläge!**

OBS! Alltid transportläge mellan  
avdelning - ambulans samt vid  
transport

## MediVacPac i **Överflyttningsläge!**

OBS! Överflyttningsläge endast vid  
överflyttning av patient

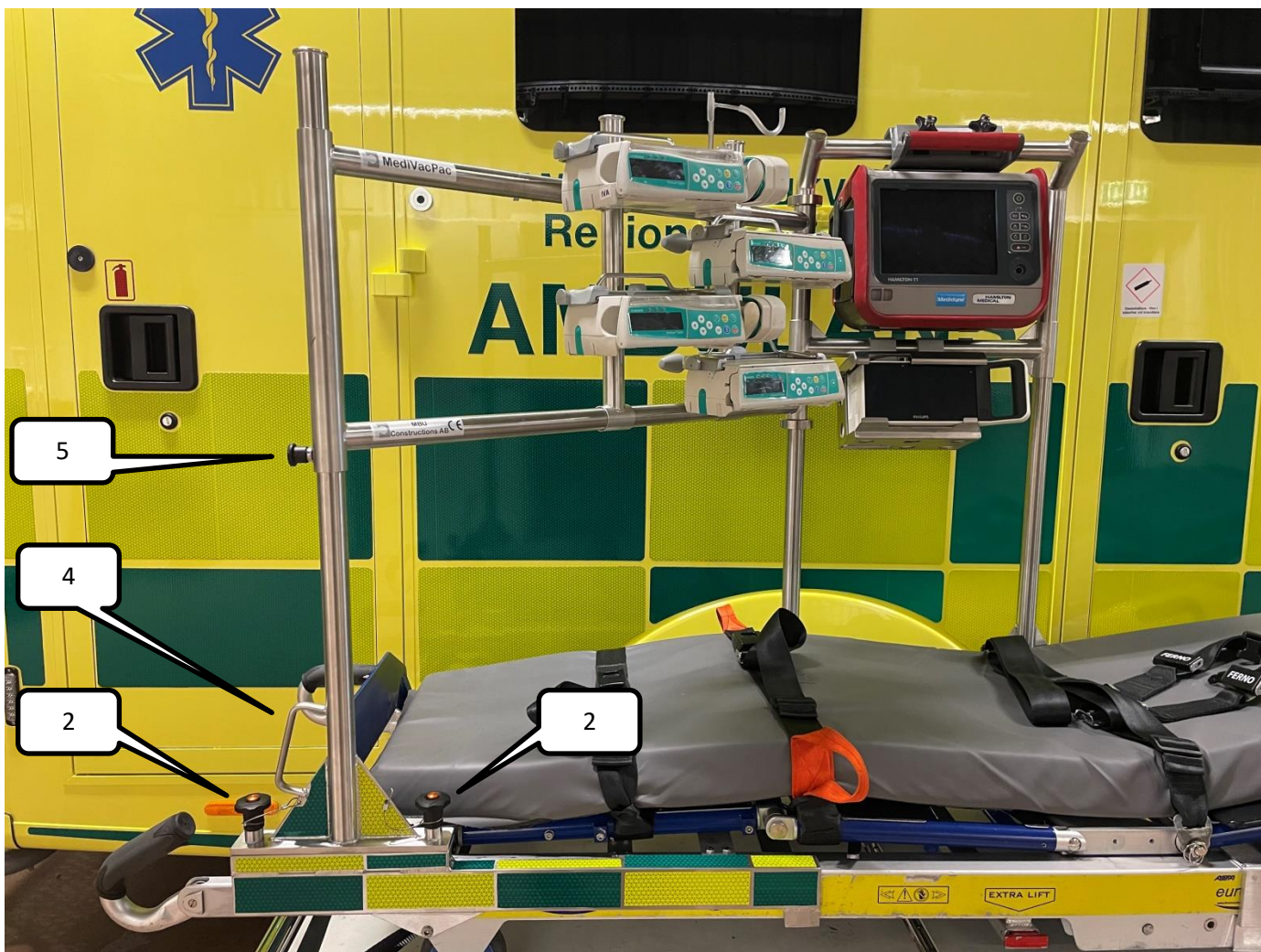

Vid överflyttning av patient används två alternativ.

*Alternativ 1.* Flytta över patient i **Transportläge**.

*Alternativ 2.* Flytta över patient i **Överflyttningsläge**.

1. Placera dig vid fotändan
2. Vrid de båda lås skruvarna ett kvarts varv motsols.
3. Tryck på skruvens centrumknapp, drag ut skruv och placera den på utsidan.
4. Greppa med höger hand i lyfthandtaget och drag ut låsknapp med vänster hand.
5. Lyft upp stödben och för över till andra sidan.






Drag ut bårens vänstra lyftarm fullt ut och placera stödben på avsedd hållare.

### ***Överflyttningsläge!***

Lyft över patient försiktigt. Efter patient är säkrad och medicinteknisk utrustning kopplad och om det är möjligt, vecka i knäled och lyft lite i rygg för stabilare läge av patient under transport. Lyft tillbaka stödbenet till ***Transportläge!***

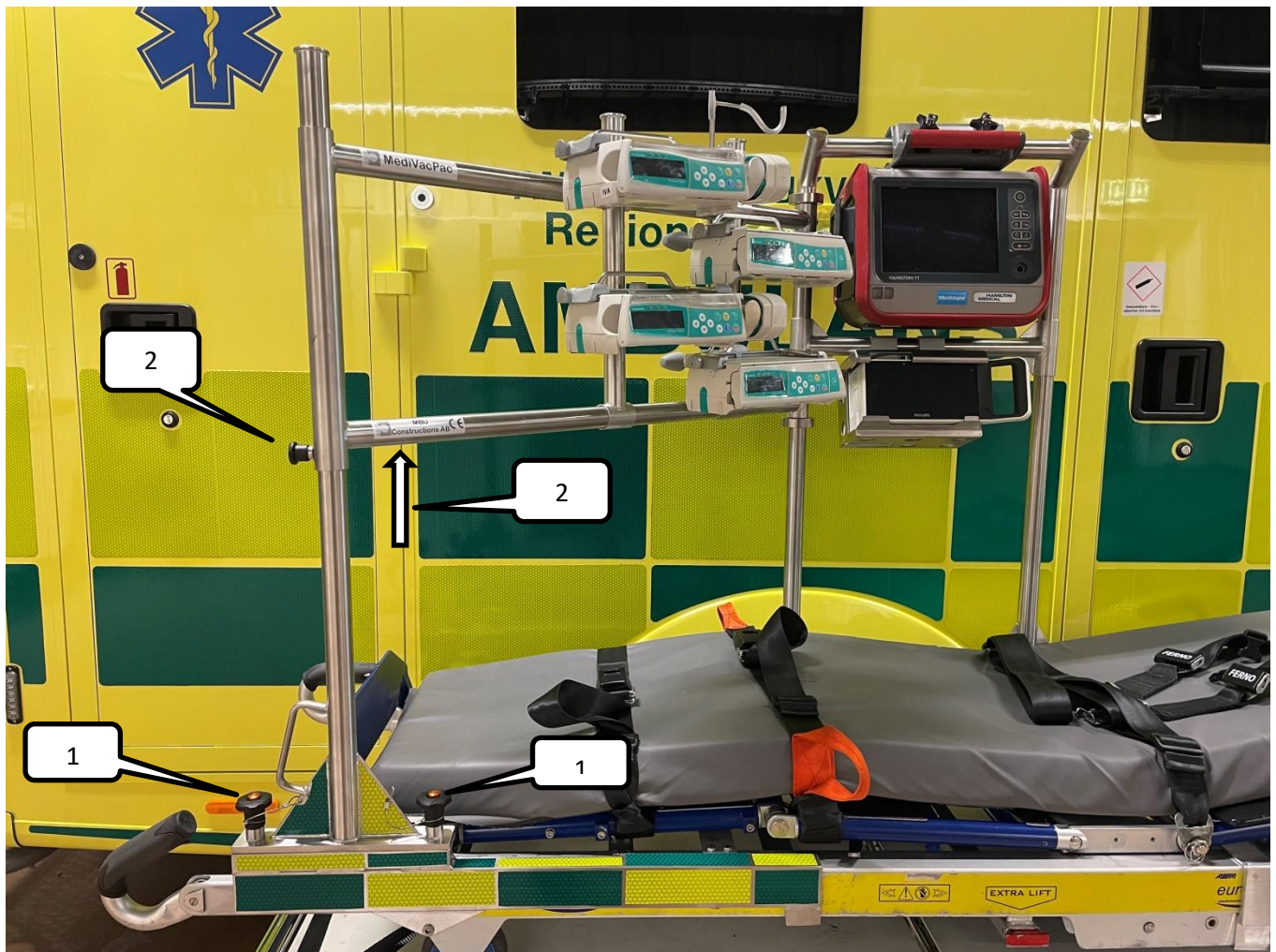

Placera stödben enligt bild.

OBS! Omvänd ordning vid låsning till **Transportläge**.

- 1, Tryck in lås skruvens centrumknapp, tryck ner den i avsett hylsa. Samma utförande med den andra lås skruven. Dra åt endast med **fingerkraft**.
2. Lyft grind lätt så att låsknapp låser. Kontrollera grind att den är i låst läge.

MediVacPac i **Transportläge**

Mer information och filmer på [www.mbu-con.se](http://www.mbu-con.se) eller skanna

